



cobas b 101



Analyse	Probe	Modus
Cholesterin, HDL, Triglyceride	K30	Patiententest (Bild 1)
CRP	I01	Patiententest (Bild 1)
HbA1c	K03 A/B	Patiententest (Bild 1)



Beim Schliessen der Kassette darauf achten, dass diese komplett geschlossen ist (sollte 2-mal klicken).
Vollblutproben 20-30-mal über Kopf kippen. Serum-/Plasmaproben 5-mal über Kopf kippen (nicht schütteln).



Einen Tropfen der Probe auf eine nicht saugfähige Unterlage pipettieren (z.B. Innenseite Testverpackung), ermöglicht das einfachere Ansaugen der Probe (Bild 3, 4 und 5).

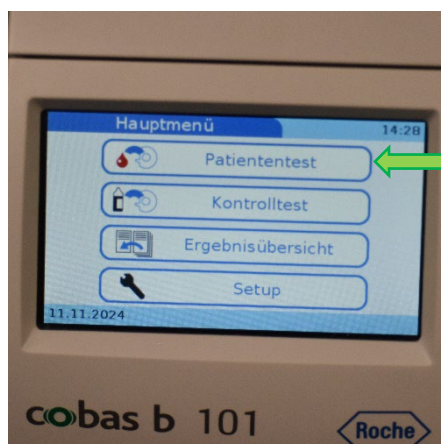


Bild 1: Modus Patiententest

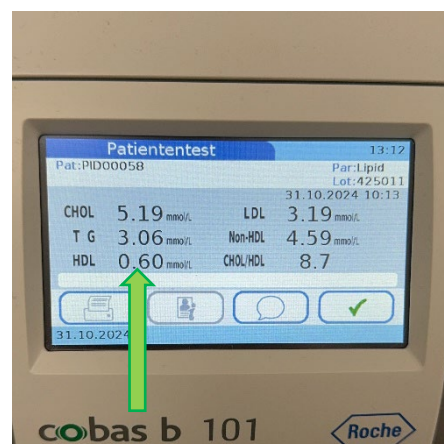


Bild 2: HDL-Wert



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

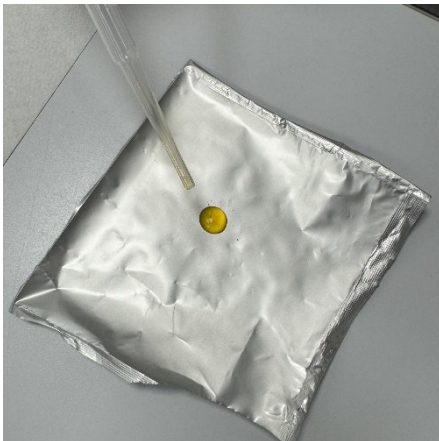


Bild 3: Probe auf nicht saugfähiger
Oberfläche



Bild 4: Befüllung der Kassette



Bild 5: Befüllte Kassette