



HemoScreen



Analisi	Campione	Modalità
WBC, RBC, PLT, HGB, HCT	H12	Modalità di controllo



Il campione deve essere mescolato molto bene (invertire 20-30 volte a mano) perché non restino cellule sul fondo o nel coperchio.

Selezionare «Controllo» e preparare il campione per l'analisi. Inserire la cartuccia nello strumento. (Figura 1).

Appena inserita la cartuccia, cliccare il tasto «EQA spento», che cambierà in «EQA acceso». (Figura 2).



A questo punto è possibile digitare il nome del campione (Figura 3). Non è necessario specificare le sottopopolazioni leucocitarie (linfociti, granulociti, ecc.).



Figura 1: Inserire la cartuccia



Figura 2: Premere il tasto EQA

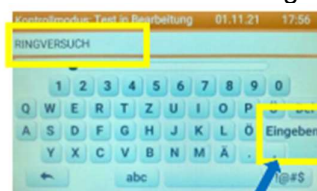


Figura 3: Tastiera per digitare il nome del campione