



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

LabPad



Analyse	Probe	Modus
CRP	I01	Patientenmodus
D-Dimer	G06	Patientenmodus
INR	G23	Patientenmodus



I01: Die Probe wie eine Kapillarblutprobe messen. Serum mit der im Test verfügbaren Kapillare aufziehen und gemäss Beipackzettel verfahren.

G06: Die Probe wie venöses Vollblut verwenden. 20 µl in Verdünnungsmittel geben und gemäss Beipackzettel verfahren.

G23: Die Ampulle muss vor Gebrauch zerbrochen werden:

- Sich vergewissern, dass die Glasampulle am Boden des Fläschchens sitzt.
- Durch zusammendrücken, die Ampulle in der Mitte, an der Oberseite und an der Unterseite zerbrechen.
- Die Spitze des Fläschchens nach unten halten und 10x kräftig schütteln.
- Erster Tropfen verwerfen
- Probe sofort wie eine Patientenprobe messen