



# LabPad



Analisi	Campione	Modalità
CRP	I01	Analisi paziente
D-Dimeri	G06	Analisi paziente
INR	G23	Analisi paziente



Campione I01: utilizzare il campione I01 come sangue capillare. Prelevare il siero con il capillare fornito col campione e procedere come da istruzioni sul foglio illustrativo.

Campione G06: utilizzare il campione come se fosse sangue intero venoso: diluire 20 µl nella soluzione del kit e procedere come da istruzioni sul foglio illustrativo.

Campione G23: L'ampolla va spezzata prima dell'uso!

- Assicurarsi che l'ampolla di vetro si trovi sul fondo del contenitore
- Premendo con le dita, schiacciare e rompere l'ampolla di vetro su tutta la sua lunghezza
- Tenere il contenitore con la punta verso il basso e agitare energicamente 10 volte
- Utilizzare la prima goccia
- Eseguire subito l'analisi, come con un campione dei pazienti.