



Microsemi CRP, Microsemi CRP LC-767G



Analisi	Campione	Modalità
WBC, RBC, PLT, HGB, HCT + CRP	H02	+CRP (Figura 1)



Invertire i campioni di sangue intero 20-30 volte a mano

Non posizionare la provetta direttamente nel portacampioni, ma utilizzare il supporto per sangue capillare (Fig. 2).

Non misurare in modalità di controllo!



Dopo aver mescolato il campione, non devono rimanere tracce di sangue aderenti al fondo.

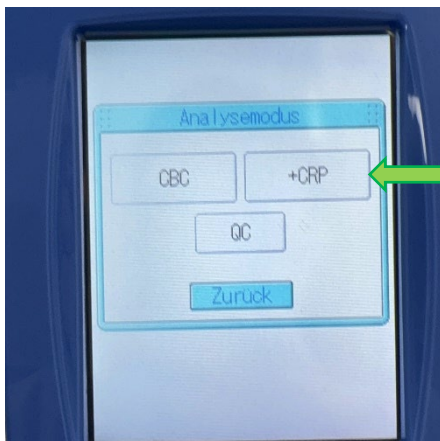


Figura 1: Modalità paziente



Figura 2: Supporto per sangue capillare