



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

miniSED/iSED



Analyse	Probe	Modus
BSR	H15	Kontrollmodus

⚠ Lagerung der Probe bei Raumtemperatur.

Legen Sie die Probe vor Gebrauch ca. 30min auf den Probenmischer und achten Sie vor Gebrauch auf eine vollständige Auflösung des Bodensatzes.

Das Gerät muss den Barcode der Probe zwingend einlesen, damit der Kontrollmodus gestartet wird.