




Test rapidi


Infezioni delle vie respiratorie

B01	Strep A	vedi descrizione
B24	Virus dell'influenza A/B, RSV	vedi descrizione
B33	SARS-CoV 2	vedi descrizione

 Il campione fornito simula il tessuto nasale o faringeo del paziente. Aspirare il campione con un tampone dal kit del test e trattarlo come un campione del paziente.


Diagnostica delle feci

B27	Helicobacter pylori	Feci liquide simulate
B30	Rotavirus, Adenovirus, Norovirus	Feci liquide simulate
B37	C. Difficile GDH, tossina A, tossina B, tossina A/B	Feci liquide simulate
S01	Sangue occulto nelle feci ql / qn	Feci simulate

 Per informazioni sulla manipolazione dei campioni di feci liquide, consultare le istruzioni del foglietto illustrativo.

Test sierologici

B20	EBV, Anticorpi eterofili	Siero/plasma
B32	SARS-CoV-2 IgM, IgG	Siero/plasma
H11	Malaria	Sangue intero
V01	HIV-Test rapido	Siero/plasma

 Prestare attenzione al tipo di materiale da testare. Leggere il foglietto illustrativo per l'esecuzione corretta dell'analisi con i rispettivi materiali.



Altri test rapidi

B38	Helicobacter-Ureasi	Biopsia simulata
I09	ImmunoCAP Rapid	Sangue intero simulato



I09

Per applicare il volume corretto di campione alla cassetta del test, utilizzare la “micropipetta” in dotazione (Fig. 1). Assicurarsi che il tubo della pipetta sia completamente riempito. La bolla inferiore funge da troppo pieno. Non è necessario riempirla.

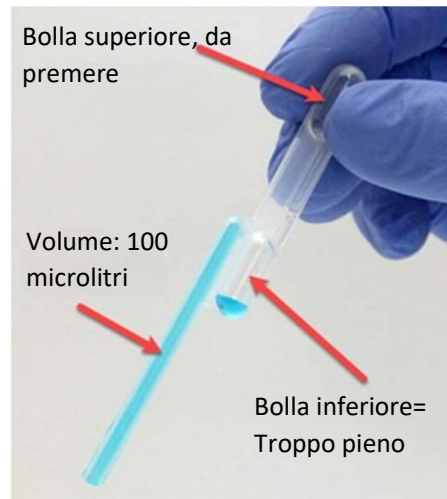


Figura 1: Micropipetta